



AVANTAGES

- Nettoyage et désinfection des circuits d'aspiration chirurgicale
- Activité bactéricide, levuricide, sporicide et virucide



Formule douce



APPLICATION

Nettoyage et désinfection par aspiration des circuits d'aspiration chirurgicale et des pompes à salive.

Action moussante contrôlée.

Dispositif médical. CLASSE IIa.

MODE D'EMPLOI

BACTINYL® ASPIRATION CHIRURGICALE est conçu pour le nettoyage et la désinfection des systèmes d'aspiration (aspiration chirurgicale, pompe à salive...) des hôpitaux, des cliniques, des cabinets de chirurgie dentaire ...

Diluer BACTINYL® ASPIRATION CHIRURGICALE de 0.5 à 2 % dans de l'eau froide ou tiède. Aspirer cette solution par les embouts flexibles des systèmes d'aspiration. Laisser agir 15 minutes.

Rincer.

La solution diluée dans un récipient ouvert peut être conservée 24 heures sans utilisation et doit être éliminée immédiatement après son utilisation

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	liquide
Couleur :	incolore
Parfum :	inodore
Densité :	= 1
pH du produit :	10.20
Péremption :	2 ans
Stockage :	4°C - 35°C



PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide : EN 13727 (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), EN 14561 (conditions de saleté – 1% – 5 min – 20°C),

Activité levuricide : EN 13624 (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), EN 14562 (conditions de saleté – 0.5% – 15 min – 20°C),

Activité sporicide : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium difficile (conditions de propreté – 5% – 60 min – 20°C)

Activité virucide : EN 14476 complète sur Norovirus, Poliovirus et Adenovirus (conditions de saleté – 2% – 15 min – 20°C); Coronavirus et Papillomavirus (conditions de saleté – 2% – 15 min – 20°C), PRV*, BVDV* et H1N1 (conditions de saleté – 2% – 5 min – 20°C), Herpès, Vaccinia virus et Rotavirus (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), HIV (conditions de saleté – 2% – 60 sec – 20°C)

* Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV (Hépatite B) et HCV (Hépatite C).

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

Réf. LB920300

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.